

特殊免疫质控 I—水平1

货号: IAS3113
批号: 2281EC

包装: 5 x 2 ml
效期: 2025-04-28

产品描述

本品为免疫分析专用质控品，又称特殊免疫质控 I，适用于临床化学体外诊断的免疫质控，用于监测免疫测定的正确度或精密度。朗道供应 3 个浓度水平（水平1：IAS3113；水平2：IAS3114；水平3：IAS3115）。

安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该质控品采用人基质血清，对所有捐献者的血清均进行了HIV（HIV1、HIV2）抗体、肝炎B表面抗原（HbsAg）和肝炎 C 病毒（HCV）抗体的测试，发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

然而，既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质，因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

保存和稳定性

开瓶后，2~8°C 保存。复溶后的血清如果保存在原始容器，并且无污染，可在 2~8°C 保存 5 天，-20°C 冷冻保存 4 周，只能冻融一次。除外以下分析物：

分析物	+2°C to +8°C	-20°C
抗甲状腺球蛋白（Anti-TG）	3 天	-
C 肽	1 天	-
类胰岛素增长因子 I（IGF-1）	8 h	-
骨钙素	4 h	-
甲状旁腺素（PTH）	4 h	14 天
降钙素原（PCT）	1 天	-

每次使用只吸取所需用量，剩余的样品不可返回原瓶。

未开瓶，2~8 °C 可保存至效期末。

复溶后的血清在受到细菌污染后，会导致许多组分稳定性的下降，应该将该瓶样品抛弃，重新复溶一瓶新的血清。

使用说明

该免疫分析专用质控品 I 为冻干粉。

- 小心打开瓶盖，往瓶中加入 2 ml 蒸馏水，在 15~25 °C 的条件下复溶，盖上瓶盖，放置 30 分钟。轻轻翻转瓶子，确保内容物完全溶解，不要振荡，避免气泡的产生。
- 参照各个分析仪的质控说明。
- 冷藏未使用的材料，再次使用前，确保样品充分混合均匀。

需要自备的材料

移液管，蒸馏水

赋值

每一批质控血清都要送到大量的参考实验室，这些实验室通过独特的统计分析方法得到一个结果进行赋值。对每一批质控血清，都提供了各个项目的不同方法学的靶值范围。质控范围值是平均值±2 SD。

注：详细赋值信息请以原版英文说明书为准，原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。

特殊免疫质控 I—水平1

货号. IAS3113 批号. 2281EC		规格 5 x 2 ml 效期 2025-04-28			
		范围			
分析物	单位	靶值	低	高	方法
1-25(OH)2维生素D	pmol/l	157	110	204	Diasorin Liaison XL
25-OH-维生素D	nmol/l	52.7	39.5	65.9	Diasorin Liaison
	nmol/l	37.8	28.4	47.3	Abbott Architect (3L52)
	nmol/l	70.9	53.2	88.6	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	nmol/l	76.0	57.0	95.0	SNIBE Maglumi Analysers
	nmol/l	55.4	41.6	69.3	Vitros ECi
	nmol/l	49.9	37.4	62.4	BioMerieux Vidas
	nmol/l	41.4	31.1	51.8	Beckman Dxl 600/800
	nmol/l	37.5	28.1	46.9	Abbott Architect (5P02)/ Alinity (8P45)
	nmol/l	54.8	41.1	68.5	Diasorin Liaison XL
	nmol/l	24.5	18.4	30.6	Roche Vitamin D Total II
	nmol/l	70.5	52.9	88.1	Siemens Atellica IM
	nmol/l	25.9	19.4	32.4	Roche Vitamin D Total II e801
	nmol/l	25.8	19.4	32.3	Roche Vitamin D Total III
抗甲状腺球蛋白抗体 Anti TG	kU/l	28.7	21.5	35.9	Siemens Immulite 2000/2500
	kU/l	46.8	35.1	58.5	Abbott Architect / Alinity
	kU/l	111	83.3	139	Roche Cobas 4000/E411
	kU/l	112	84.0	140	Roche Cobas e601/602
	kU/l	70.2	52.7	87.8	Beckman Dxl 600/800
	kU/l	46.1	34.6	57.6	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	kU/l	75.8	56.9	94.8	Beckman Access/LXi725
	kU/l	76.6	57.5	95.8	BioMerieux Vidas
	kU/l	49.2	36.9	61.5	Siemens Atellica IM
	kU/l	108	81.0	135	Roche Cobas e402/e801
	kU/l	50.7	38.0	63.4	Siemens Atellica IM aTgII
抗甲状腺过氧化物酶抗体 Anti TPO	kU/l	48.8	36.6	61.0	Abbott Architect / Alinity
	kU/l	51.1	38.3	63.9	Siemens Immulite 2000/2500
	kU/l	28.0	21.0	35.0	Beckman Dxl 600/800
	kU/l	196	147	245	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	kU/l	46.0	34.5	57.5	BioMerieux Vidas
	kU/l	29.7	22.3	37.1	Roche Cobas e402/e801
	kU/l	186	140	233	Siemens Atellica IM
C-肽 C-Peptide	nmol/l	0.342	0.257	0.428	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	ng/ml	1.03	0.776	1.28	
	nmol/l	0.459	0.344	0.574	Roche Cobas e601/602
	ng/ml	1.39	1.04	1.74	
	nmol/l	0.373	0.280	0.466	Abbott Architect / Alinity
	ng/ml	1.13	0.845	1.42	
	nmol/l	0.309	0.232	0.386	Siemens Immulite 2000/2500
	ng/ml	0.933	0.700	1.17	
	nmol/l	0.445	0.334	0.556	Roche Cobas 4000/E411
	ng/ml	1.34	1.01	1.67	

特殊免疫质控 I—水平1

货号. IAS3113 批号. 2281EC		规格 5 x 2 ml 效期 2025-04-28			
		范围			
分析物	单位	靶值	低	高	方法
C-肽 C-Peptide	nmol/l	0.492	0.369	0.615	Diasorin Liaison XL
	ng/ml	1.49	1.11	1.87	
	nmol/l	0.436	0.327	0.545	Roche Cobas e402/e801
	ng/ml	1.32	0.987	1.65	
胰岛素样生长因子1 IGF 1	nmol/l	0.341	0.256	0.426	Siemens Atellica IM
	ng/ml	1.03	0.773	1.29	
	µg/l	67.7	50.8	84.6	Siemens Immulite 2000/2500
	µg/l	29.0	21.8	36.3	Diasorin Liaison
胰岛素 Insulin	µg/l	17.5	13.1	21.9	Roche Cobas 4000/E411
	µg/l	16.1	12.1	20.1	Roche Cobas 6000/8000
	µg/l	15.7	11.8	19.6	Roche Elecsys
	mU/l	4.70	3.53	5.88	Abbott Architect
	µU/ml	4.70	3.53	5.87	
	mU/l	4.99	3.74	6.24	Roche Cobas 6000/8000
	µU/ml	4.99	3.74	6.24	
	mU/l	5.60	4.20	7.00	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	µU/ml	5.60	4.20	7.00	
	mU/l	2.32	1.74	2.90	Siemens Immulite 2000
µU/ml	2.32	1.74	2.90		
mU/l	4.51	3.38	5.64	Beckman Dxl 600/800	
µU/ml	4.51	3.38	5.64		
mU/l	5.33	4.00	6.66	Roche Cobas 4000/E411	
µU/ml	5.33	4.00	6.66		
mU/l	4.77	3.58	5.96	Diasorin Liaison XL	
µU/ml	4.77	3.58	5.96		
mU/l	5.41	4.06	6.76	Siemens Atellica IM	
µU/ml	5.41	4.06	6.76		
mU/l	4.47	3.35	5.59	Abbott Alinity i	
µU/ml	4.47	3.35	5.59		
骨钙素 Osteocalcin	µg/l	15.2	11.4	19.0	Siemens Immulite 2000/2500
	µg/l	29.1	21.8	36.4	Roche Cobas 6000/8000
	µg/l	28.6	21.5	35.8	Roche Cobas 4000/E411
甲状旁腺素 (PTH)	pmol/l	5.53	4.15	6.91	Abbott Architect / Alinity
	pg/ml	52.5	39.4	65.6	
	pmol/l	4.00	3.00	5.00	Beckman Dxl 600/800
	pg/ml	38.0	28.5	47.5	
	pmol/l	3.98	2.99	4.98	Roche Cobas e601/602 PTH
	pg/ml	37.8	28.4	47.2	
	pmol/l	4.42	3.32	5.53	Roche Cobas 4000/e411 PTH/PTH STAT
	pg/ml	42.0	31.5	52.5	
pmol/l	5.14	3.86	6.43	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	
pg/ml	48.8	36.7	60.9		
pmol/l	4.30	3.23	5.38	Roche Cobas e601/602 PTH (1-84)	
pg/ml	40.8	30.7	50.9		
pmol/l	4.53	3.40	5.66	Roche Cobas 4000/E411 PTH (1-84)	
pg/ml	43.0	32.3	53.7		

特殊免疫质控 I—水平1

货号. IAS3113 批号. 2281EC		规格 5 x 2 ml 效期 2025-04-28			
		范围			
分析物	单位	靶值	低	高	方法
甲状旁腺素 (PTH)	pmol/l	5.10	3.83	6.38	Siemens Atellica IM
	pg/ml	48.4	36.4	60.4	
	pmol/l	4.09	3.07	5.11	Roche Cobas e801 PTH
	pg/ml	38.8	29.2	48.4	
	pmol/l	4.41	3.31	5.51	Roche Cobas e801 PTH (1-84)
	pg/ml	41.9	31.4	52.4	
pmol/l	3.96	2.97	4.95	Roche Cobas e801 PTH STAT	
pg/ml	37.6	28.2	47.0		
降钙素原 (PCT)	pmol/l	3.85	2.89	4.81	Roche Cobas e601/602 PTH STAT
	pg/ml	36.6	27.4	45.8	
	µg/l	0.890	0.668	1.11	Brahms Kryptor
	µg/l	2.64	1.98	3.30	BioMerieux Vidas
	µg/l	1.29	0.968	1.61	Roche Elecsys/Cobas/Modular
	µg/l	2.33	1.75	2.91	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	µg/l	2.38	1.79	2.98	Siemens Centaur CP 10378883
	µg/l	1.29	0.968	1.61	Abbott Architect / Alinity Brahms PCT
	µg/l	1.31	0.983	1.64	Roche Cobas e402/e801
	µg/l	2.33	1.75	2.91	Siemens Atellica IM 10995651
	µg/l	1.77	1.33	2.21	Beckman Access PCT
	µg/l	2.25	1.69	2.81	Siemens Centaur XP/XPT 11202697
µg/l	2.20	1.65	2.75	Siemens Centaur CP 11202697	
µg/l	2.30	1.73	2.88	Siemens Atellica IM 11202699	