

特殊免疫质控 I—水平3

货号: IAS3115
批号: 2220EC

包装: 5 x 2 ml
效期: 2024-11-28

产品描述

本品为免疫分析专用质控品，又称特殊免疫质控 I，适用于临床化学体外诊断的免疫质控，用于监测免疫测定的正确度或精密度。朗道供应 3 个浓度水平（水平1：IAS3113；水平2：IAS3114；水平3：IAS3115）。
安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该质控品采用人基质血清，对所有捐献者的血清均进行了 HIV(HIV1、HIV2)抗体、肝炎 B 表面抗原 (HbsAg) 和肝炎 C 病毒 (HCV) 抗体的测试，发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

然而，既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质，因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

保存和稳定性

开瓶后，2~8℃保存。复溶后的血清如果保存在原始容器，并且无污染，可在 2~8℃保存 5 天，-20℃冷冻保存 4 周，只能冻融一次。抗甲状腺球蛋白 (Anti-TG) 在 2~8℃可稳定 3 天，C 肽、类胰岛素增长因子 I (IGF-1)、降钙素原 (PCT) 在 2~8℃可稳定 8 小时，骨钙素在 2~8℃可稳定 4 小时。甲状旁腺素 (PTH) 复溶后如果 2~8℃保存，要在 4 小时内检测；若-20℃以下保存，则须在 2 周内检测。每次使用只吸取所需用量，剩余的样品不可返回原瓶。

未开瓶，2~8℃可保存至效期末。

复溶后的血清在受到细菌污染后，会导致许多组分稳定性的下降，应该将该瓶样品抛弃，重新复溶一瓶新的血清。

使用说明

该免疫分析专用质控品 I 为冻干粉。

1. 小心打开瓶盖，往瓶中加入 2 ml 蒸馏水，在 15~25℃的条件下复溶，盖上瓶盖，放置 30 分钟。轻轻翻转瓶子，确保内容物完全溶解，不要振荡，避免气泡的产生。
2. 参照各个分析仪的质控说明。
3. 冷藏未使用的材料，再次使用前，确保样品充分混合均匀。

需要自备的材料

移液管，蒸馏水

赋值

每一批质控血清都要送到大量的参考实验室，这些实验室通过独特的统计分析方法得到一个结果进行赋值。对每一批质控血清，都提供了各个项目的不同方法学的靶值范围。质控范围值是平均值±2 S.D.。

注：详细赋值信息请以原版英文说明书为准，原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。

特殊免疫质控品1-水平3

货号. IAS3115 批号. 2220EC

规格 5 x 2 ml 效期 2024-11-28

分析物	单位	靶值	范围		方法
			低	高	
1-25(OH)2维生素D	pmol/l	317	222	412	Diasorin Liaison XL
25-OH-维生素D	nmol/l	84.7	63.5	106	Roche Vitamin D Total
	nmol/l	94.0	70.5	118	Diasorin Liaison
	nmol/l	92.9	69.7	116	Abbott Architect (3L52)
	nmol/l	124	93.0	155	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	nmol/l	85.8	64.4	107	BioMerieux Vidas
	nmol/l	84.9	63.7	106	Beckman Dxl 600/800
	nmol/l	96.2	72.2	120	Abbott Architect (5P02)/ Alinity (8P45)
	nmol/l	94.8	71.1	119	Diasorin Liaison XL
	nmol/l	91.7	68.8	115	Roche Vitamin D Total II
	nmol/l	121	90.8	151	Siemens Atellica IM
	nmol/l	89.4	67.1	112	Roche Vitamin D Total II e801
	nmol/l	90.0	67.5	113	Roche Vitamin D Total III
抗甲状腺球蛋白抗体 Anti TG	kU/l	359	269	449	Siemens Immulite 2000/2500
	kU/l	696	522	870	Abbott Architect / Alinity
	kU/l	1903	1427	2379	Roche Cobas 4000/E411
	kU/l	2006	1505	2508	Roche Cobas e601/602
	kU/l	813	610	1016	Beckman Dxl 600/800
	kU/l	795	596	994	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	kU/l	725	544	906	BioMerieux Vidas
	kU/l	859	644	1074	Siemens Atellica IM
	kU/l	1738	1304	2173	Roche Cobas e402/e801
	kU/l	851	638	1064	Siemens Atellica IM aTgII
	kU/l	903	677	1129	Siemens Centaur XP/XPT aTgII
抗甲状腺过氧化物酶抗体 Anti TPO	kU/l	117	87.8	146	Abbott Architect / Alinity
	kU/l	147	110	184	Siemens Immulite 2000/2500
	kU/l	81.2	60.9	102	Roche Cobas 4000/E411
	kU/l	78.4	58.8	98.0	Roche Cobas c501/502 e601/602
	kU/l	63.7	47.8	79.6	Beckman Dxl 600/800
	kU/l	414	311	518	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	kU/l	90.7	68.0	113	BioMerieux Vidas
	kU/l	103	77.3	129	Roche Cobas e402/e801
	kU/l	411	308	514	Siemens Atellica IM
C-肽 C-Peptide	nmol/l	1.860	1.400	2.330	Roche Cobas e601/602
	ng/ml	5.62	4.23	7.01	
	nmol/l	1.710	1.280	2.140	Abbott Architect / Alinity
	ng/ml	5.16	3.86	6.46	
	nmol/l	1.710	1.280	2.140	Siemens Immulite 2000/2500
	ng/ml	5.16	3.86	6.46	
	nmol/l	1.830	1.370	2.290	Roche Cobas 4000/E411
	ng/ml	5.52	4.14	6.90	
	nmol/l	2.110	1.580	2.640	Diasorin Liaison XL
	ng/ml	6.37	4.77	7.97	

特殊免疫质控品1-水平3

货号. IAS3115 批号. 2220EC

规格 5 x 2 ml 效期 2024-11-28

分析物	单位	靶值	范围		方法
			低	高	
C-肽 C-Peptide	nmol/l	1.810	1.360	2.260	Roche Cobas e402/e801
	ng/ml	5.46	4.11	6.81	
	nmol/l	1.550	1.160	1.940	Siemens Atellica IM
	ng/ml	4.68	3.50	5.86	
胰岛素样生长因子1 IGF 1	µg/l	492	369	615	Siemens Immulite 2000/2500
	µg/l	214	161	268	Diasorin Liaison
	µg/l	123	92.3	154	Roche Cobas 6000/8000
	µg/l	114	85.5	143	Roche Elecsys
胰岛素 Insulin	mU/l	33.6	25.2	42.0	Abbott Architect
	µU/ml	33.6	25.2	42.0	
	mU/l	45.3	34.0	56.6	Roche Cobas 6000/8000
	µU/ml	45.3	34.0	56.6	
	mU/l	43.8	32.9	54.8	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	µU/ml	43.8	32.9	54.7	
	mU/l	37.7	28.3	47.1	Beckman Dxl 600/800
	µU/ml	37.7	28.3	47.1	
	mU/l	46.8	35.1	58.5	Roche Cobas 4000/E411
	µU/ml	46.8	35.1	58.5	
	mU/l	41.4	31.1	51.8	Siemens Atellica IM
	µU/ml	41.4	31.1	51.7	
骨钙素 Osteocalcin	µg/l	49.9	37.4	62.4	Siemens Immulite 2000/2500
	µg/l	148	111	185	Roche Cobas 6000/8000
	µg/l	147	110	184	Roche Cobas 4000/E411
甲状旁腺素(PTH)	pmol/l	108	81.0	135	Abbott Architect / Alinity
	pg/ml	1026	769	1283	
	pmol/l	77.1	57.8	96.4	Beckman Dxl 600/800
	pg/ml	732	549	915	
	pmol/l	67.8	50.9	84.8	Roche Cobas e601/602 PTH
	pg/ml	644	483	805	
	pmol/l	73.8	55.4	92.3	Roche Cobas 4000/e411 PTH/PTH STAT
	pg/ml	701	526	876	
	pmol/l	99.0	74.3	124	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	pg/ml	940	706	1174	
	pmol/l	63.7	47.8	79.6	Roche Cobas e601/602 PTH (1-84)
	pg/ml	605	454	756	
	pmol/l	69.4	52.1	86.8	Roche Cobas 4000/E411 PTH (1-84)
	pg/ml	659	495	823	
	pmol/l	97.0	72.8	121	Siemens Atellica IM
	pg/ml	921	691	1151	
	pmol/l	66.3	49.7	82.9	Roche Cobas e801 PTH
	pg/ml	630	472	788	
pmol/l	60.5	45.4	75.6	Roche Cobas e801 PTH (1-84)	
pg/ml	575	431	719		

特殊免疫质控品1-水平3

货号. IAS3115 批号. 2220EC

规格 5 x 2 ml 效期 2024-11-28

分析物	单位	靶值	范围		方法
			低	高	
甲状旁腺素(PTH)	pmol/l	64.4	48.3	80.5	Roche Cobas e801 PTH STAT
	pg/ml	612	459	765	
	pmol/l	62.8	47.1	78.5	Roche Cobas e601/602 PTH STAT
	pg/ml	596	447	745	
降钙素原	µg/l	9.67	7.25	12.1	Brahms Kryptor
	µg/l	20.8	15.6	26.0	BioMerieux Vidas
	µg/l	15.0	11.3	18.8	Roche Elecsys/Cobas/Modular
	µg/l	20.3	15.2	25.4	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
	µg/l	20.1	15.1	25.1	Siemens Centaur CP 10378883
	µg/l	14.8	11.1	18.5	Abbott Architect / Alinity Brahms PCT
	µg/l	14.8	11.1	18.5	Roche Cobas e402/e801
	µg/l	19.4	14.6	24.3	Siemens Atellica IM 10995651
	µg/l	19.0	14.3	23.8	Beckman Access PCT
	µg/l	19.3	14.5	24.1	Siemens Centaur XP/XPT 11202697
	µg/l	20.9	15.7	26.1	Siemens Centaur CP 11202697
	µg/l	18.6	14.0	23.3	Siemens Atellica IM 11202699